



## VAROVÁNÍ

- Nikdy nemanipulujte s připojeným zvlhčovačem a přístrojem ResMed S9, když je v nádržce voda.
- Zvlhčovač se může napojovat či odpojovat, jen pokud je nádržka na vodu vyprázdněná.
- Nepřepřavujte přístroj ResMed S9 s připojeným zvlhčovačem.
- Nepřeplňujte nádržku na vodu.
- Nepoužívejte do vody žádná aditiva (např. vonný olej, parfém, sůl, minerální vodu).
- Před použitím si pečlivě přečtete přiložený podrobný návod k obsluze (User Guide).

### 1. Napojení zvlhčovače



Přiložte zvlhčovač H5i a přístroj ResMed S9 k sobě a vzájemně je proti sobě přitlačte, až dojde k zacvaknutí spojovacího mechanismu.

### 2. Připojení hadice ClimateLine



Na zadní straně přístroje sejměte černý gumový kryt konektoru. Konec hadice s oranžovým konektorem nasuňte na výstupní otvor. Pootočte koncovkou hadice ve směru hodinových ručiček, až do zacvaknutí obou konektorů.

**Koncovkou hadice otáčejte výhradně za šedou gumovou část!**

Při použití standardní hadice pouze nasuňte libovolný konec na výstupní otvor.

## Zvlhčovač ResMed H5i - rychlý postup k uvedení do provozu.....

### 3. Plnění nádržky na vodu



Odjistěte víko zvlhčovače odsunutím západky směrem vpravo a zvedněte víko zvlhčovače. Vyměňte nádržku na vodu. Naplňte nádržku vodou po značku MAX. Použijte pouze sterilní destilovanou vodu z lékárny nebo převařenou vychlazenou vodu z vodovodu. Nádržku vraťte do přístroje a zavřete víko.

**Každé ráno vždy zbylou vodou vylijte!**

**Nemanipulujte s přístrojem, pokud je v komoře zvlhčovače nádržka s vodou!**

### 4. Údržba zvlhčovače



1x týdně vyjměte nádržku z přístroje, demontujte na jednotlivé díly a odstraňte usazeniny. Jednotlivé díly lze umýt v myčce. K odstranění vodního kamene na stěně nádržky použijte roztok potravinářské kyseliny citronové.

**Dbejte o čistotu nádržky!**

### 5. Odpojení zvlhčovače



Vyměňte nádržku na vodu. Na zadní straně zvlhčovače zatlačte na aretační tlačítko a oddělte zvlhčovač od přístroje ResMed S9.

**Před odpojením se přesvědčte, že v nádržce zvlhčovače není voda!**